


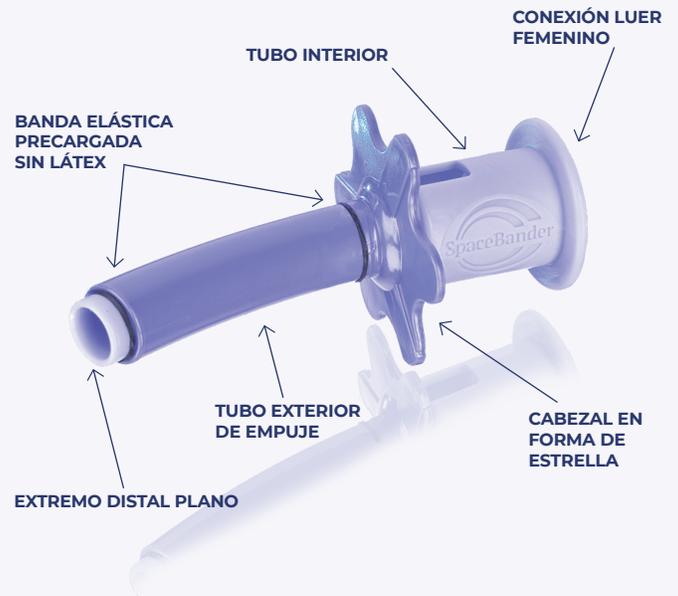

Dispositivo para la ligadura con banda elástica para hemorroides

INSTRUCCIONES DE USO

1. Realice un examen digital del recto para determinar el cuadrante que va a ligar (lateral izquierdo, anterior derecho o posterior derecho).
2. Lubrique la punta del dispositivo SpaceBander®.
3. Dirija la punta del dispositivo hacia la hemorroide a tratar e insértelo con una maniobra arqueada suave hasta que el cabezal esté nivelado con el borde anal. Asegúrese que la punta del dispositivo esté por encima de la línea dentada.
4. Conecte el cierre Luer masculino de la jeringa al cierre Luer femenino del tubo interior con un movimiento en sentido de las agujas del reloj.
5. Aplique succión al cuadrante objetivo tirando del émbolo de la jeringa hacia la posición de bloqueo.
6. Obtenga retroalimentación del paciente para determinar si está experimentando presión o dolor. *Nota: Si el paciente siente presión, esto es normal y esperado. Si el paciente siente dolor, libere la succión aflojando la conexión de bloqueo Luer de la jeringa y redirija la colocación del dispositivo, ya sea más adentro o en un ángulo ligeramente diferente.*
7. Cuando esté en posición, mantenga quieto el cilindro de la jeringa, entonces empuje el cabezal en forma de estrella hacia adelante, liberando la banda elástica sin látex. Alternativamente, se puede sostener el cabezal en forma de estrella en su posición y tirar de la jeringa / tubo interior para soltar la banda.
8. Separe la jeringa con un movimiento en sentido antihorario para liberar la succión. Luego retire el dispositivo SpaceBander®.
9. Realice otro examen digital del recto para confirmar la colocación de la banda elástica; documente la posición de la banda.



INDICACIONES DE USO

SpaceBander® se utiliza para la ligadura de hemorroides internas.

PRECAUCIONES

La ligadura de hemorroides solo debe realizarse en hemorroides internas por encima de la línea dentada. El tratamiento por debajo de la línea dentada puede provocar un dolor severo. Tenga cuidado con los pacientes que presenten plaquetas bajas, anticoagulantes, enfermedad inflamatoria intestinal, fisuras anales y embarazo.

ADVERTENCIA

Después de su uso, este producto puede presentar un riesgo biológico potencial. Manipule y elimine de acuerdo con la práctica médica aceptada y las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables.

